

airmax²

breathing redefined

nasal strips



1 WAS

2 PLAATS

3 DRUK

AIRMAX NEUSPLEISTERS

Verbetert uw luchtstroom en opent voorzichtig uw neusholtes tijdens het slapen, dagelijks gebruik en sportactiviteiten. Sterke pasvorm, verlichting bij verkoudheid en allergieën, helpt snurken te verminderen, helpt de kwaliteit van de slaap te verbeteren, kan de atletische prestaties verbeteren.

Instructies voor gebruik:

- 1. WAS**
uw neus met zeep en water, droog volledig af.
- 2. PLAATS**
de neuspleister in het midden van de neus.
- 3. DRUK**
met uw vingertoppen de neuspleister op de neus en houd 30 seconden vast.

Om te verwijderen. Maak de neus en de strip nat en til de strip voorzichtig vanuit beide uiteinden op.

Waarschuwingen:

- Alleen voor uitwendige neustoepassing.
- Niet gebruiken op een geïrriteerde of door de zon verbrande huid, of over zweren.
- Laat niet langer dan 12 uur per dag op de huid zitten.
- Als er irritatie optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
- Niet gebruiken voor kinderen jonger dan 5 jaar.
- Slaapapneu is een ernstige medische aandoening die een nauwkeurige diagnose en de juiste therapie vereist. Als u deze problemen vermoedt, raadpleeg dan uw arts voordat u dit product gebruikt.
- Niet gemaakt met natuurlijk rubberlatex.
- Informeer ASO en de autoriteiten in het geval van ernstige incidenten die te maken hebben met dit product.



SLEEPING



DURING DAY



SPORTS



CLEAR



TAN

available in 2 colours



ASO LLC, 300 Sarasota
Center Blvd. 34240 Sarasota FL, USA



ASO Europe BV, Nijverheidstraat 48
6681 LN Bommel, The Netherlands



LINK 3 Ltd, Sterling House,
Fulbourne Road,
Walthamstow, E17 4EE, UK



Airmax BV,
Rhinjeesterstraatweg 58a
2341 BV Oegstgeest,
The Netherlands

UKCA Experts Ltd.
Dept 302, 43 Owston Road,
Carcroft, Doncaster, DN6 8DA,
United Kingdom

www.airmax.nu

