

Informatie en gebruiksaanwijzing

Gefeliciteerd met de aanschaf van het kersenpitkussen van Marco Polo!

Met het kersenpitkussen geniet u van een al eeuwenoude Zwitserse traditie. Dit kussen is gevuld met speciaal gedroogde en gereinigde kersenpitten, die de bijzondere eigenschap hebben om warmte op te nemen en die langzaam af te geven aan de omgeving.

Door deze unieke eigenschap geeft dit kussen een aangename en ontspannende warmte bij spier- of buikpijn en bij nek- en schouderklachten. Ook is dit kussen toepasbaar bij rug- en gewrichtspijn. Tevens is het een ideaal hulpmiddel als warmtedrager voor massage of in bed tegen de kou. Het kersenpitkussen kan ook goed als koudekompres dienen. Leg het kussen daarvoor in de vriezer of koelkast.

De werking van kersenpitten is een klein wonder van de natuur. Een kersenpit bestaat namelijk uit een kleine binnenpit met daaromheen een buitenpit. Tussen deze twee lagen bevindt zich lucht. Deze luchtlaag zorgt ervoor dat de kersenpit een isolerende werking heeft, vergelijkbaar met een thermosfles.

Het kersenpitkussen is een natuurzuiver product, zorgt voor een aangename warmteafgifte en heeft een aromatische geur. Het is een natuurlijke balsem met een doeltreffende massagewerking en is eenvoudig in gebruik.

Het kersenpitkussen is beschikbaar in diverse modellen voor verschillende toepassingen:

- Vierkant model: dit multifunctionele model is verkrijgbaar in 24x24 cm of in de maxi-uitvoering van 28x28 cm.
- Rugmodel: dit kussen is 16x50 cm lang, bestaat uit drie compartimenten en is ideaal voor mensen met rug- en/of nekklachten.
- U-vormig nekmodel: dit U-vormig model ligt comfortabel op de schouders en bedekt een gedeelte van de rug.
- Junior- of kindermodel: het juniormodel is 16x30 cm, het kindermodel is 18x18 cm.

Hoe verwarmt u het kersenpitkussen?

Magnetron

1. Plaats en kopje water in de magnetron. De waterdamp voorkomt uitdroging van de pitten en bevordert een langere levensduur.
2. Leg het kersenpitkussen zorgvuldig midden op het draaiplateau in uw magnetron. Verwijder altijd het rooster uit de magnetron.
3. Stel het vermogen van de magnetron in op maximaal 600 Watt en verwarm het kussen circa 1 minuut.
4. Is de gewenste temperatuur nog niet bereikt, verleng dan de opwarmtijd in stappen van 15 seconden.

Zorg dat het kersenpitkussen geen belemmering vormt voor het goed draaien van de draaischijf. Indien de magnetron geen draaischijf bevat, dient u het kussen halverwege de opwarmtijd om te draaien voor een gelijkmatige verwarming.

Oven

1. Verwarm het kersenpitkussen in een vuurvaste schaal met deksel in het midden van de oven bij een maximum temperatuur van 130 graden Celsius. Verwarm het kussen ongeveer 10 minuten.
2. Draai het kersenpitkussen halverwege de tijd om voor een gelijkmatige verwarming.

Belangrijk om te weten!

- Laat het kersenpitkussen altijd afkoelen na gebruik (minimaal 1 uur) voordat u het opnieuw gebruikt.
- Overschrijding van de opwarmtijd of temperatuurinstelling leidt niet tot een langere warmteafgifte, maar kan schroeï- en brandschade veroorzaken.
- Gebruik nooit een kersenpitkussen bij ontstekingen, eczemen, tumoren en hartklachten.

De producent is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik. Volg het advies daarom nauwgezet op.