

testjezelf.nu



Opiaten / Morfine

Sneltest voor de detectie van drugs in urine
Product-# 21.040E

Inleiding

U hebt besloten een test doen waarmee u de aanwezigheid van opiaten in urine kunt aantonen.

Met deze test heeft u een kwalitatief hoogwaardig product in handen.

Lees voor aanvang van de test deze handleiding zorgvuldig door zodat u betrouwbare testresultaten krijgt en deze op een juiste manier interpreteert.

Deze handleiding bevat namelijk belangrijke aanwijzingen die, voor een juiste uitvoering van de test, absoluut gevolgd dienen te worden.

Een verpakking bevat:

- Een plastic pouch met testcassette inclusief een pipet voor het druppelen van de urine.
De plastic pouch pas openen op het moment dat u gaat testen.
- Een gebruikershandleiding

Verder hebt u nodig:

- Een schone beker of glas om de urine in te verzamelen
- Een stopwatch of horloge

Aanwijzingen i.v.m. testmateriaal

Deze test is uitsluitend bedoeld voor het testen in urine en niet geschikt voor toepassingen in ander testmateriaal zoals speeksel of zweet.

Bewaartemperatuur

De gesloten plastic pouch bij kamertemperatuur onder 30°C of in de koelkast (2-8°C) bewaren

Onder deze omstandigheden kan de uiterste houdbaarheidsdatum zoals vermeldt op de pouch gegarandeerd worden.

De test niet gebruiken wanneer de plastic pouch beschadigd is of wanneer de uiterste houdbaarheidsdatum verstreken is.

ACHTERGRONDEN:

Tegenwoordig is het gebruik van drugs voor veel jongeren heel gewoon. Vaak merkt men uiterlijk niets aan deze jongeren zodat familie en andere naasten bijna geen aanwijzingen krijgen die op een eventuele drugsverslaving duiden. Hierdoor kunnen zij de eigenlijk noodzakelijke hulp niet verlenen.

Omdat veel voorkomend gedrag bij drugsgebruikers zoals agressie, verminderde prestaties op school of werk, het zich afzetten tegen ouders ook bij veel puberende jongeren voorkomt en als normaal wordt beschouwd, valt het drugsgebruik vaak niet op.

Wanneer de vriendenkring van de jongere echter verandert of deze in staat blijkt schijnbaar moeiteloos hele nachten uit te gaan dan kunnen dit aanwijzingen zijn die op drugsgebruik duiden.

Spreek met de desbetreffende persoon over uw vermoeden van drugsgebruik en vraag hem of haar een urinemonster af te geven. Hiermee kunt u dan aantonen of er daadwerkelijk sprake is van drugsgebruik.

KORTE DRUGSWETENSCHAP

Met deze test kunt u opiaten en/of de afbraakproducten van opiaten in urine aantonen.

Tot de groep van de opiaten behoort ook het verdovende middel heroïne. Opiumderivaten (afgeleiden van opium) worden echter ook in medicatie gebruikt zoals bijvoorbeeld in de vorm van morfine als sterke pijnstiller of als codeïne in hoestbestrijdende medicamenten.

Opium wordt gewonnen uit het melksap van de papaver. Heroïne zorgt al na enkele dagen of weken of voor verslavingsverschijnselen en zorgt voor een hele sterke lichamelijk verslaving. Naast de pijnbestrijdende werking heeft heroïne ook een hypnotiserende en kalmerende werking. Ook zorgt het voor een verminderde eetlust. Gevolgen van langdurig gebruik van heroïne zijn een verminderde fysieke gesteldheid, vermagering, pijnlijke spieren en storingen in de bloedsomloop. Psychische effecten van langdurig gebruik van heroïne zijn verslaving, lusteloosheid, apathie en in sommige gevallen zelfs depressiviteit. Opiaten worden met een injectiespuit ingespoten of worden oraal ingenomen. De opiaten worden door het lichaam snel afgebroken en kunnen maximaal 2-3 dagen na gebruik nog in urine worden aangetoond.

HOE WERKT DE TEST?

Het aantonen van de drug in urine gebeurt door middel van een voor deze drug specifieke gekleurd antilichaam. Wanneer de drug in de urine aanwezig is zal deze een verbinding met dit antilichaam aangaan en verhindert daardoor dat het antilichaam een verbinding met het Testmembraan kan aangaan. De kleur van de testlijn zal met een stijgende drugsconcentratie steeds lichter worden totdat deze uiteindelijk volledig verdwijnt. (Positief testresultaat) De controlelijn zal altijd zichtbaar moeten zijn, het al dan niet aanwezig zijn van de drug in de urine is niet van invloed. De controlelijn dient ter controle van het juist functioneren van de test.

UITVOERING VAN DE TEST

1) Voorbereiding

- Leg de plastic pouch met de test klaar. Wanneer de test in de koelkast werd bewaard moet deze ongeopend voor gebruik eerst op kamertemperatuur gebracht worden.
- Voor het opvangen van de urine heeft u een glas of een beker nodig. Deze moet schoon en droog zijn en mag en geen resten van afwasmiddel bevatten. Verder hebt u een stopwatch of een horloge nodig

2) Urinemonster afnemen


- Vraag de te testen persoon om een urinemonster af te geven.
(in de beker te plassen)

Let op: Manipulatiegevaar

Zorg ervoor dat bij de afgifte van het urinemonster geen manipulatie mogelijk is. Sommige drugsgebruikers zijn zeer vindingrijk om het drugsgebruik, zoals bijvoorbeeld bij politiecontroles, te maskeren. Deze trucs worden soms ook via het Internet verspreid. Zorg ervoor dat er in de ruimte geen vloeistoffen aanwezig zijn die in plaats van de urine in de beker kunnen worden gegoten. Ook mogen geen andere personen en dieren in de ruimte aanwezig zijn. Verder kan men proberen de urine met chemicaliën te vermengen om de test te beïnvloeden. Een chloor- of citroenlucht, andere geurstoffen of schuimvorming van het urinemonster zijn duidelijke aanwijzingen dat het urinemonster is gemanipuleerd. Deze gemanipuleerde urinemonsters mag men niet voor de test gebruiken.


3) Uitvoering van de test

- Neem de testcassette en pipet uit de plastic pouch. De lege plastic pouch en zakje met droogmiddel kunt u bij het normale huisvuil doen. Start onmiddellijk na het openen van de plastic pouch met testen.
- Leg de cassette op een vlakke ondergrond en neem even de tijd om de testcassette rustig te bekijken.

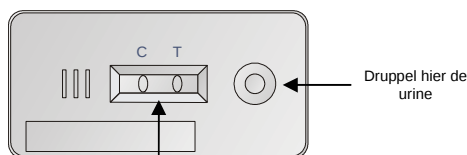

Resultaatvenster: In dit gebied verschijnen na het druppelen van de urine de controlelijn C en bij een negatief resultaat de testlijn T. Het resultaatvenster mag bij het druppelen van de urine niet vochtig worden.

- Doop het puntje van de pipet in de urine en zuig een beetje urine op tot aan het streepje op de pipet.
- Druppel nu 3-4 druppels urine in de ronde opening van de testcassette. Start onmiddellijk na het druppelen de stopwatch of het horloge. U ziet nu dat de roodgekleurde vloeistof zich langzaam over het resultaatvenster naar boven beweegt.

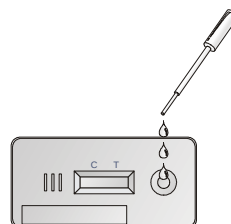

testjezelf.nu



- Lees het testresultaat na 5 minuten af. Later dan 5 minuten aflezen is ook mogelijk echter maximaal 15 minuten. Aflezen na 15 minuten kan een onbetrouwbaar en foutief resultaat opleveren.

4) Interpretatie van het testresultaat

Kijk naar het resultaatvenster om het testresultaat te kunnen interpreteren. Binnen het resultaatvenster zijn één of twee rode lijnen zichtbaar. De controlelijn C moet in ieder geval zichtbaar zijn omdat deze aangeeft dat de test op een juiste manier is uitgevoerd. Daarbij is de sterkte (kleurintensiteit) van deze lijn niet belangrijk. Wanneer er geen C-lijn verschijnt is de test niet goed uitgevoerd en het testresultaat dus ongeldig.

Het verschijnen van de testlijn T is afhankelijk van de drugconcentratie in de urine en geeft het eigenlijke testresultaat aan. De kleurintensiteit van de lijn vermindert bij een toenemende drugsconcentratie in de urine en zal bij een kritische grensconcentratie volledig verdwijnen. Dit is het resultaat dat men kan verwachten bij drugsgebruik. De volgende afbeelding geven aan hoe men het testresultaat moet interpreteren.

Negatief testresultaat:

In het resultaatvenster verschijnen 2 gekleurde lijnen. De controlelijn C geeft aan de test correct is uitgevoerd. De aanwezigheid van de testlijn T geeft aan dat het testresultaat negatief is. De kleurintensiteit van de testlijn T kan daarbij zowel sterker als zwakker zijn dan de controlelijn C. Dit testresultaat betekent dat het urinemonster geen drugs of afbraakproducten hiervan bevat. In ieder geval overschrijdt de concentratie de kritische grenswaarde niet.



Wanneer de test één van de bovenstaande resultaten aangeeft dan kunt u er met hoge waarschijnlijkheid van uit gaan dat de geteste persoon geen opiaten (heroïne) gebruikt heeft. .

Positief testresultaat:

In het resultaatvenster verschijnt alleen de controlelijn C. De testlijn T ontbreekt en is niet te herkennen. Dit resultaat betekent dat de urine een concentratie opiaten bevat die de kritische grenswaarde overschrijdt.



Wanneer de test bovenstaand resultaat aangeeft dan kunt u er met hoge waarschijnlijkheid van uit gaan dat de geteste persoon opiaten gebruikt heeft.

Belangrijke aanwijzing

Denkt u er a.u.b. aan dat dit niet per definitie betekent dat de testpersoon ook daadwerkelijk heroïne heeft gebruikt omdat ook sommige legale medicamenten sporen van opiaten kunnen bevatten. Ook de consumptie van levensmiddelen met maanzaad kan een positief testresultaat tot gevolg hebben. Meer informatie hierover vindt u onder het hoofdstuk „VEEL GESTELDE VRAGEN“.

Ongeldig:

Wanneer er geen controlelijn C verschijnt is de test ongeldig, ook wanneer er wel een testlijn T verschijnt. Zie de afbeeldingen hieronder. Herhaal in dat geval de test nog eens met een nieuwe testcassette.



VEEL GESTELDE VRAGEN

Wat kan ik doen als het testresultaat positief is?

Blijf in ieder geval rustig. Met een eventuele woedeuitbarsting bent zowel u als ook de geteste persoon niet geholpen. Het kan zelfs zo zijn dat een dergelijke reactie een nadelige invloed heeft op de bereidheid van de geteste persoon om zich verder door u of anderen te laten helpen.

Probeer rationeel en helder te blijven denken en handelen en praat met de geteste persoon over de mogelijkheid om hulp te zoeken bij bijvoorbeeld uw huisarts of verslavingszorginstellingen.

Wanneer de geteste persoon tekenen van een acute vergiftiging vertoont neem dan onmiddellijk contact met een (huis)arts op.

Informeer de arts over het positieve testresultaat en neem ook deze handleiding mee.

Een positief testresultaat geeft alleen aan dat de concentratie van de opiaten in de urine de kritische grenswaarde heeft overschreden. Het geeft de gebruikte hoeveelheid opiaten niet aan.

Wanneer u de test in een laboratorium grondiger wilt laten onderzoeken dan kunt na het testen de testcassette nog 2 dagen gekoeld (tussen de 2-8°C) bewaren.

Zijn er buiten het gebruik van heroïne nog andere omstandigheden die tot een positief testresultaat kunnen leiden?

Ja, zoals al eerder gemeld bevatten enkele legale medicamenten ook opiumderivaten. In de meeste gevallen gaat het hierbij om medicamenten die alleen op doktersvoorschrift verkrijgbaar zijn of om medicamenten tegen prikkelende hoest. Mocht de geteste persoon inderdaad dergelijke medicamenten gebruiken, vraag dan aan uw arts of de werkzame stof in deze medicamenten aan morfine verwante stoffen bevat. Ook het gebruik van het antibioticum Rifampicine kan voor een positief testresultaat zorgen. De gangbare, vrij verkrijgbare pijnstillers, beïnvloeden normaal gesproken het testresultaat niet.

Ook de consumptie van etenswaren met maanzaad kunnen een positief resultaat veroorzaken.

Vraag de testpersoon dan ook voor urineafgifte of deze dergelijke etenswaren heeft gegeten.

Denk er a.u.b. aan dat deze test **niet** het gebruik van andere drugs zoals Marihuana, Amfetamine, Cocaine e.d. aantoon.

Voor het testen op gebruik van deze drugs, gebruikt u de voor deze drugstypen specifieke Testjezelf.nu drugscassettes.

Hoe betrouwbaar is de test?

Klinische studies tonen aan dat de Testjezelf.nu drugstesten zeer betrouwbaar zijn.

In urinemonsters met een morfinegehalte boven de kritische grens waarde zal dit zeker worden aangetoond.

De kritische grenswaarde waarbij de testlijn T reeds begint te verdwijnen ligt bij 300 ng/ml.

Door deze lage grenswaarde kan ook een gering heroïnegebruik al worden aangetoond.

Hoe lang zijn opiaten in urine aantoonbaar?

Opiaten worden door het lichaam snel afgebroken en zijn ca. 2-3 dagen aantoonbaar in de urine, waarbij factoren als lichaamsgewicht en de mate van gewenning op deze tijd van invloed kunnen zijn. De test is zeer gevoelig en toont al een betrekkelijk kleine concentratie opiaten (300 ng/ml) in de urine aan.

VOOR UW VEILIGHEID

- Volg a.u.b. deze handleiding nauwkeurig. Om een betrouwbaar resultaat te verkrijgen is het zeer belangrijk de test uit te voeren zoals in de handleiding beschreven staat.
- De test alleen voor onderzoek in urine gebruiken. Andere lichaamsvloeistoffen mogen niet worden gebruikt. De test niet innemen.
- De test buiten bereik van kinderen bewaren.
- Een test waarbij de pouch beschadigd is of waarvan de houdbaarheidsdatum verstreken is mag niet meer worden gebruikt.
- De test slechts eenmaal gebruiken.
- Deze test bevat potentieel infectieus materiaal (b.v. antilichamen) Wanneer deze test correct volgens de handleiding wordt uitgevoerd bestaat er geen besmettingsgevaar.
- Gebruikte testen kunnen bij het normale huisafval.

VERKLARING VAN DE GEBRUIKTE SYMBOLEN

Cont.	Inhoud		Slechts éénmalig gebruiken
LOT	Chargennummer		Houdbaarheidsdatum
			Bewaartemperatuur

Versie: 2007/04