



































Mission Plus Hb Hemoglobine Meetsysteem EERSTE SETUP

Eerste setup

Doe de vier meegeleverde batterijen in het apparaat. De meter vraagt nu om datum en tijd in te voeren. Gebruik de linker  en rechter pijltoets  om de datum (maand, dag) en tijd in te stellen, en de aan-uitknop  om deze op te slaan. Hierna schakelt de meter vanzelf uit.

Het meetapparaat configureren

U moet de meter voor het eerste gebruik configureren. Dit hoeft slechts eenmaal te worden gedaan.

1. Druk op de aan / uit-knop  gedurende vier seconden. De meter toont ^{No}.SET. Druk op  om de eerste testdag stellen. Druk eenmaal op (links)  en kies nummer 99, om de eerste test als de dag 1 te starten. Druk  om op te slaan. Op het display verschijnt ^{No}.SET.
2. Druk tweemaal rechts  tot SET en daarna op  om met het instellen te starten.
3. Gebruik  en  om een 12- of 24-uurs formaat te kiezen. Druk op  om op te slaan en verder te gaan.
4. Gebruik  en  om het juiste jaar in te stellen. Druk op  om op te slaan en verder te gaan.
5. Gebruik  en  om maand en datum te kiezen. Druk op  om op te slaan en verder te gaan.
6. Gebruik  en  om de tijd in uren en minuten in te stellen. Druk op  om op te slaan en verder te gaan.
7. Gebruik  en  om de RESET van het testnummer in of uit te schakelen. Het testnummer wordt op elke nieuwe testdag teruggezet naar 1 wanneer het opnieuw instellen van het testnummer is ingeschakeld. Druk op  om op te slaan en verder te gaan.
8. Gebruik  en  om te kiezen tussen g/dl, g/L of mmol/L. Druk op  om op te slaan en verder te gaan.
9. Gebruik  en  om het geluid in- of uitschakelen. Druk op  om op te slaan en verder te gaan.
10. Druk eenmaal Links  om tot ELT (exit) Druk op  om de setup te verlaten.

De meter is nu klaar voor gebruik.



Mission Plus Hb Hemoglobine Meetsysteem MEET PROTOCOL

Het meten


U heeft nodig:

- Mission Plus Hb Meter
- Prikpen & lancetten
- Teststrip Hb Mission Plus Hemoglobine met Code Chip
- Capillair buisje 10 μ L
- Alcohol doekje
- Plastic handschoentjes
- Pen en papier om uw testresultaten te noteren

Belangrijk:

- Lees de handleiding en teststrip-bijsluiter voordat u de meter gebruikt
- De Mission Plus Hb is alleen voor gebruik door medische professionals.
- De teststrips zijn erg gevoelig. Draag altijd handschoenen.

Vingertop bloedonderzoek - Hoe te meten?

1. **Zet het apparaat aan** door op de  knop te drukken.
Na het opstarten, zal het beginscherm worden weergegeven.
Stop de rode code chip in de sleuf aan de linkerzijde van de meter.
Controleer of de code op de verpakking van de teststrips overeenkomt met die op het display.


Belangrijk: noteer de vervaldatum op het etiket bij opening van een nieuwe buisje. De vervaldatum is 3 maanden na de datum van opening,

Belangrijk: Sluit het buisje onmiddellijk na eruit halen van een teststrip.

Belangrijk: gebruik de teststrips na opening niet langer dan 3 maanden.

Opmerking: Laat de codechip in de meter totdat alle strips zijn gebruikt. Elke nieuwe verpakking teststrips bevat een nieuwe codechip.

2. **Plaats de Test:** Schuif de teststrip in het apparaat in de richting van de pijltjes. Zorg ervoor dat de teststrip helemaal wordt ingebracht tot het einde. Het witte deel boven de zwarte streep is dan niet meer zichtbaar.

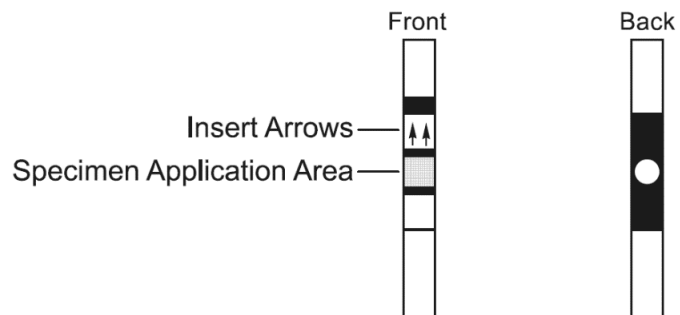

Belangrijk: Het bloeddruppelsymbool knippert rechts in het scherm om aan te geven dat teststrip en meter klaar zijn voor gebruik.

Let op: de Hb teststrips zijn zeer gevoelig. De strip aan het uiteinde en alleen met handschoenen aan uit het busje halen. Pas op dat het middendeel van het stripje niet beschadigt. Na opening zijn nog 3 maanden houdbaar, mits droog bewaard.


3. **Bloedprikken met de prikpen of veiligheidslancet:**

Maak de vinger met een alcohol doekje schoon en wacht tot de vinger droog is en de alcohol is verdampt. Prik in de zijkant van de vingertop. Veeg de eerste druppel bloed weg.

Tip: Eventueel licht masseren richting de punctie,

Tip: prik de zijkant van de vingertop dat is minder gevoelig

4. **Vul het capillair met 10 μ L bloed tot het zwarte vullijntje.**

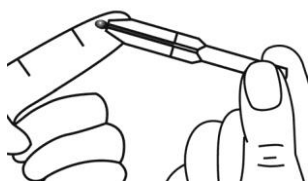

Houd het capillaire busje schuin omhoog met de opening naar boven, en raak voorzichtig de bolle bloeddruppel aan.

Let op: Niet knijpen in het busje, want het vult vanzelf.

5. **Bloed aanbrenge op de teststrip**

Gebruik het capillaire busje om het bloed aan te brengen op de teststrip. De meter begint met testen en toont drie knipperende streepjes.

Let op: houdt het busje boven de strip zonder deze te raken of te beschadigen.

6. Het resultaat verschijnt binnen 15 seconden. De Hct waarde onderin het scherm. Als de Hb waarde lager is dan 4,5 g/dl of 2,8 mmol/l geeft de meter Lo aan.